



EU 2017/745
MDR Class I

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Verpackungseinheit
4065873507335	0050/2733	hellgrün	50 Stück (5x10 Stück-Packung)

TECHNIMASK M2 R

Medizinische Gesichtsmaske

DIN EN 14683:2019-10 Typ IIR

Top-Ausstattung

Medizinische Gesichtsmasken Typ IIR, DIN EN 14683:2019-10

CE als Klasse I Medizinprodukt nach EU 2017/745

Bakterielle Filterleistung $\geq 98\%$ und Spritzschutz von $\geq 16,0$ kPa

Geringer Atemwiderstand < 40 Pa/cm² bietet hohen Tragekomfort

Mikrobiologische Reinheit ≤ 30 KBE/g

Integrierter Meltblown-Filter senkt das Risiko von Tröpfcheninfektionen für den Träger und seine Umgebung


Insbesondere auch für medizinisches Assistenz- & Fachpersonal im Rettungsdienst, in Arztpraxen, in Pflege-/Altersheimen, in Krankenhäusern und in anderen medizinischen Einrichtungen geeignet

Erhöhter Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer, hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Aerosole

Sehr hautfreundliches weiches Vliesmaterial und hoher Tragekomfort durch elastische Ohrschlaufen und eingearbeitetem Nasenbügel

Made in Germany - Hergestellt in Deutschland (Vogtland/Sachsen)

Anwendung

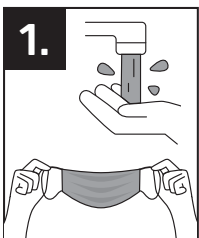

1. Vor dem Anlegen der medizinischen Gesichtsmaske Hände mit Wasser und Seife mindestens 20 Sekunden waschen. Maske aus der Verpackung entnehmen und mit beiden Händen an den Ohrschlaufen halten. Vor Gebrauch auf Beschädigungen und Verschmutzungen kontrollieren.




2. Die Oberseite der Maske ist durch den eingearbeiteten biegsamen Draht zu erkennen, mit dem die Maske an den Nasenrücken angepasst wird. Die Maske mit der weißen Seite nach innen so aufsetzen, dass sie Nase und Mund bedeckt. Beide Ohrschlaufen um die Ohren, so dass die Maske fest sitzt.



3. Den Nasenbügel mit beiden Zeigefingern von der Mitte nach außen hin an den Nasenrücken anpassen.



4. Den unteren Teil der Maske über das Kinn ziehen. Die Maske soll auf dem Nasenrücken und an den Wangen möglichst eng anliegen. Vermeiden Sie die Maske während der Verwendung zu berühren. Eine Maske sollte alle zwei Stunden oder wenn sie feucht wurde gewechselt werden. Einweg-Produkte sollen nicht mehrfach und nur von einer Person getragen werden.

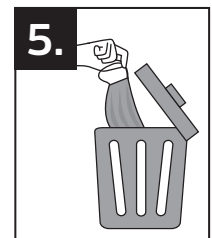

5. Zum Abnehmen die Maske an beide Ohrschlaufen fassen. Maske direkt in einen geschlossenen Mülleimer entsorgen. Danach die Hände waschen / desinfizieren.